

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

## ТРАНСПАЛАТИНАЛЕН ДИСТРАКТОР (TPD)

Твърде тясната горна челюст често причинява проблеми като липса на място за зъбите, неправилно съотношение на зъбите, дишане през устата и по-малко естетична усмивка.

"Транспалатинална дистракция" е техника, при която горната челюст се разширява.



Ключове за пациенти на TPD


Хирургът ще отслаби по хирургичен път горната челюст и ще постави транспалатинален дистрактор (TPD) в небцето. След това горната челюст се разширява чрез разширяване на самия TPD.

Около 5 до 7 дни след процедурата ще получите ключ на пациента. С него можете сами да разширявате TPD всеки ден.

TPD има 3 страни. На всяка от тях можете да видите цветен символ (жълт кръг, синьо число, червен триъгълник) или цветна точка (синя, червена, жълта). Идеята е, че чрез завъртане на TPD с мундщука на пациента всеки ден в устата ще се появява нов символ или цветна точка и TPD ще бъде под напрежение.



TPD с различни цветни символи

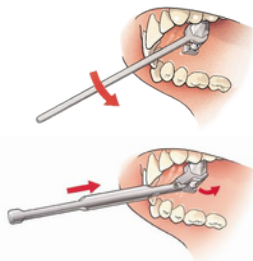

Разширяване на TPD с помощта на ключа за пациента

За да се премине към следващия символ/цвет и за да се разшири TPD, ключът на пациента се поставя върху TPD, възможно най-близо до горните зъби. След това ключът се завърта от горните към долните зъби или се избутва напред. Ако следващият символ/цвет не се вижда напълно или няма напрежение върху TPD, повторете това, докато следващият символ/цвет се види напълно или докато TPD се окаже под напрежение.

Разширяването на TPD с помощта на ключа на пациента ще отнеме няколко седмици, в зависимост от това колко голямо е разширяването. По време на процеса на разширяване ще се увеличава разстоянието между средните резци. Това ще бъде коригирано чрез ортодонтско лечение. Моля, обърнете внимание, че тази празнина се разширява всеки ден.



разстояние между резците

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

## ТРАНСПАЛАТИНАЛЕН ДИСТРАКТОР (TPD)

След като се постигне желаното разширение, хирургът блокира TPD, така че да не може да се стеснява или разширява. TPD ще остане на мястото си в продължение на 4 до 6 месеца. След изтичането на този период и когато TPD вече не е необходим за ортодонтското лечение, хирургът ще премахне TPD.



Фронтален изглед преди лечението



Фронтален изглед след лечението

### Няколко точки за внимание:

- TPD трябва винаги да е под напрежение
- Ако дистракторът се разхлаби или настъпят необичайни промени в областта на челюстите, хирургът трябва да бъде информиран възможно най-скоро
- Разстоянието между средните резци трябва да се разширява всеки ден
- Добрата орална хигиена е абсолютно задължителна
- е прилагайте прекомерни сили и не манипулирайте TPD
- Избягвайте постоянното движение на езика срещу TPD
- Свържете се с вашия лекар, ако смятате, че имате странични ефекти свързани с TPD или неговата употреба, или ако сте загрижени за рискове
- Необходимо е периодично проследяване от страна на вашия лекар
- Премествайте максимум две маркировки на ден, за да избегнете прекомерно разширяване
- Асиметричното разширяване може да доведе до коригираща операция



Преди



по време



след

### Проследете разсейването си, като посочите кой цвят е видим днес:

ден 1	ден 2	ден 3	ден 4	ден 5	ден 6	ден 7	ден 8	ден 9	ден 10
..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....
○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×
ден 11	ден 12	ден 13	ден 14	ден 15	ден 16	ден 17	ден 18	ден 19	ден 20
..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....	..... / .....
○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×