

BETEGTÁJÉKOZTATÁS

TRANZPALATÁLIS DISZTRAKTOR (TPD)

A túl keskeny felső állkapocs gyakran okoz olyan problémákat, mint a fogak helyhiánya, a fogak közötti helytelen kapcsolat, a szájlégzés és a kevésbé esztétikus mosoly.

A "transzpalatális disztrakció" olyan technika, amely során a felső állkapocs kiszélesedik.



TPD betegkulcsok


A sebész műtéti úton gyengíti a felső állkapcsot, és egy transzpalatális distractort (TPD) helyez el a szápadláson. A felső állkapocs ezután magának a TPD-nek a szélesítésével szélesedik.

Körülbelül 5-7 nappal a beavatkozás után kap egy betegkulcsot. Ennek segítségével minden nap saját maga bővítheti a TPD.

A TPD-nek 3 oldala van. Mindegyik oldalán egy-egy színes szimbólum (sárga kör, kék szám, piros háromszög) vagy színes pont (kék, piros, sárga) látható. A lényege, hogy - a TPD-t a betegkulcs segítségével elforgatva - minden nap egy új szimbólum vagy színes pont válik láthatóvá a szájbán, vagy a TPD feszültség alá kerül.



TPD különböző színű szimbólumokkal

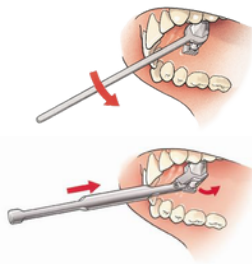

TPD bővítés a betegkulccsal

A következő szimbólumra/színre való áttéréshez és a TPD kiszélesítéséhez a betegkulcsot a TPD fölé kell helyezni, a lehető legközelebb a felső fogakhoz. Ezután a kulcsot a felső fogakról az alsó fogakra fordítják, vagy előre tolják. Ha a következő szimbólum/szín nem teljesen látható, vagy a TPD nem feszül, ismétlje meg ezt addig, amíg a következő szimbólum/szín teljesen láthatóvá nem válik, vagy amíg a TPD nem feszül.

A TPD kiszélesítése a betegkulcs segítségével néhány hetet vesz igénybe, attól függően, hogy mekkora kiszélesítésre van szükség. A szélesítés során a középső metszőfogak között egyre nagyobb rés keletkezik. Ez végül fogszabályozó kezeléssel korrigálható. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a rés minden nap szélesedik.



rés a metszőfogak között

BETEGTÁJÉKOZTATÁS

TRANSZPALATÁLIS DISZTRAKTOR (TPD)

A kívánt tágulás elérése után a sebész elzárja a TPD-t, hogy az ne tudjon szűkülni vagy szélesedni. A TPD 4-6 hónapig marad a helyén. Ezen időszak után, és amikor a TPD-re már nincs szükség a fogszabályozáshoz, a sebész eltávolítja a TPD-t.



Frontális nézet
kezelés előtt



Frontális nézet
kezelés után

Néhány figyelemfelhívó pont:

- A TPD-nek mindig feszültnek kell lennie
- Ha a distractor meglazul, vagy szokatlan változások következnek be a középső arc és/vagy az alsó állkapocs területén, a sebészt a lehető leghamarabb értesíteni kell.
- A középső metszőfogak közötti résnek minden nap szélesednie kell.
- Kezelés alatt feltétlenül szükséges a jó szájhigiéncia
- Ne alkalmazzon túlzott erőket, és ne manipulálja a TPD-t.
- Kerülni kell a nyelv állandó mozgását a TPD ellen.
- Ha úgy véli, hogy mellékhatások jelentkeznek, forduljon egészségügyi szakemberéhez a TPD-vel vagy annak használatával kapcsolatban, vagy ha aggódik a kockázatok miatt.
- Szükség van a sebész által végzett rendszeres nyomon követésre.
- Naponta legfeljebb két jelölést vonjon el, hogy elkerülje a túltágulást
- Az aszimmetrikus tágulás korrekációs műtétet eredményezhet



előtte



közben



utána

Kövesse nyomon a kiszélesedést, és jelezze, hogy ma melyik szín látható:

Nap 1	Nap 2	Nap 3	Nap 4	Nap 5	Nap 6	Nap 7	Nap 8	Nap 9	Nap 10
..... / / / / / / / / / /
○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×
Nap 11	Nap 12	Nap 13	Nap 14	Nap 15	Nap 16	Nap 17	Nap 18	Nap 19	Nap 20
..... / / / / / / / / / /
○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×	○ ▼ ×