

# INFORMACE PRO PACIENTA

## TRANSPALATAL DISTRACTOR (TPD)

### TRANSPALATINÁLNÍ DISTRACTOR (TPD)

Příliš úzká horní čelist často způsobuje problémy, jako je nedostatek místa pro zuby, nesprávný vztah mezi zuby, dýchání ústy a méně estetický úsměv. „Transpalatinální distrikce“ je technika, při které se horní čelist rozšiřuje.




TPD patient keys  
(Pacientské klíče TPD)

Chirurg horní čelist chirurgicky oslabí a umístí do patra transpalatinální distraktor (TPD). Horní čelist se poté rozšiřuje rozšiřováním samotného TPD. Přibližně 5 až 7 dní po zákroku obdržíte pacientský klíč (patient key). S jeho pomocí si můžete TPD sami každý den rozšiřovat.

TPD má 3 strany. Na každé straně můžete vidět barevný symbol (žlutý kruh, modré číslo, červený trojúhelník) nebo barevnou tečku (žlutou, modrou, červenou). Záměrem je, aby se – otáčením TPD pomocí pacientského klíče – každý den v ústech objevil nový symbol nebo barevná tečka.



TPD s různými  
barevnými symboly

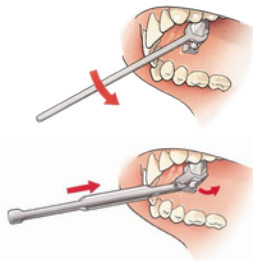

Rozšiřování TPD pomocí  
pacientského klíče

Pro otočení na další symbol/barvu a rozšíření TPD se pacientský klíč umístí na TPD co nejbližší k horním zubům. Poté se klíč otočí od horních zubů k dolním zubům nebo se posune dopředu. Pokud další symbol/barva není plně viditelný/viditelná nebo pokud na TPD není napětí, opakujte to, dokud další symbol/barva nebude plně viditelný/viditelná nebo dokud TPD nebude pod napětím.

Rozšiřování TPD pomocí pacientského klíče bude trvat několik týdnů v závislosti na tom, jak velké rozšíření je potřeba. Během procesu rozšiřování bude mezi středními řezáky vznikat stále větší mezera. Ta bude nakonec korigována ortodontickou léčbou. Vezměte prosím na vědomí, že tato mezera se každý den zvětšuje.



mezera mezi řezáky

# INFORMACE PRO PACIENTA

## TRANSPALATAL DISTRACTOR (TPD)

### TRANSPALATINÁLNÍ DISTRACTOR (TPD)

Jakmile bude dosaženo požadovaného rozšíření, chirurg TPD zablokuje, aby se nemohl stát užším ani širším. TPD zůstane na místě 4 až 6 měsíců. Po uplynutí této doby, a když už TPD nebude potřeba pro ortodontickou léčbu, chirurg TPD odstraní.



Pohled zepředu  
před distrakcí



Pohled zepředu  
po distrakci

### Některé body, kterým je třeba věnovat pozornost:

- TPD musí být vždy pod napětím
- Pokud se distraktor uvolní nebo dojde k neobvyklým změnám ve střední části obličeje a/nebo v oblasti dolní čelisti, musí být chirurg co nejdříve informován
- Mezera mezi středními řezáky se musí každý den zvětšovat
- Dobrá ústní hygiena je během léčby naprosto nezbytná
- Nepůsobte nadměrnými silami ani nemanipulujte s TPD
- Vyhněte se neustálému pohybu jazyka proti TPD
- Kontaktujte svého zdravotnického pracovníka, pokud se domníváte, že pociťujete nežádoucí účinky související s TPD nebo jeho používáním, nebo pokud máte obavy z rizik
- Je vyžadováno pravidelné sledování vašim chirurgem
- Provádějte distrakci maximálně o dvě značky denně, aby nedošlo k nadměrnému rozšíření
- Asymetrické rozšíření by mohlo vést ke korekční operaci



před



během



po

### Sledujte svou distrakci a uveďte, která barva je dnes viditelná:

| Den 1         | Den 2         | Den 3         | Den 4         | Den 5         | Den 6         | Den 7         | Den 8         | Den 9         | Den 10        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... |
| ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         |
| Den 11        | Den 12        | Den 13        | Den 14        | Den 15        | Den 16        | Den 17        | Den 18        | Den 19        | Den 20        |
| ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... | ..... / ..... |
| ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         | ○ ▼ ×         |